

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>

Технические характеристики МОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МИУ- "КРОНТ"



Основные характеристики

Габаритные размеры

(895x650x1230)±20 мм

Макс. объем ванны

45 л

Внутренние размеры ванны

(680x430x165)±10 мм

Масса

не более 20 кг

Габаритные размеры упакованного изделия

(990x260x640)±20 мм

Объем упакованного изделия

0.17 м³

Вес упакованного изделия

20 кг

Мойка медицинская инструментальная универсальная МИУ-«КРОНТ» предназначена для предварительной и окончательной очистки (мойки водой и моющим средством, ручная механическая очистка с помощью щеток) наружных поверхностей, внутренних каналов и клапанов гибких эндоскопов и других медицинских изделий, с целью

повышения качества дальнейшей обработки.

Конструкция мойки позволяет проводить обработку медицинских изделий методом полного погружения (замачивания) в воду или раствор средств и ручную механическую очистку с помощью щеток.

Для увеличения эксплуатационных возможностей установки, в качестве дополнительной поверхности для размещения необходимых принадлежностей для обработки, в конструкции предусмотрены полки и нижний поддон. Ванна, поддон, полки и контейнеры выполнены из полимерных материалов, разрешенных к применению в изделиях медицинского назначения.

Установка оснащена всеми необходимыми приспособлениями для подключения к водопроводной сети с горячей и холодной водой и к системе общей канализации.

При обработке эндоскопов Установку можно использовать (на этапе Окончательной очистки) в комплекте с Установкой дезинфекционной эндоскопической УДЭ-1-«КРОНТ» и/или с Устройством для обработки эндоскопов ЭНДОДЕЗ-«КРОНТ» и/или Установкой дезинфекционной эндоскопической УДЭ-2-«КРОНТ».

Контейнеры

В комплект поставки входят контейнеры КДС-0.2-"КРОНТ", предназначенные для обработки эндоскопических принадлежностей и компонентов (загубники, клапаны, адаптеры, заглушки и т.п.).

Ванна для эндоскопа

Ванна имеет обтекаемые контуры для избежания критических изгибов эндоскопов при обработке. Глубина ванны достаточна для полного погружения эндоскопа в воду или моющий раствор.

Система подачи воды. Смеситель

Система подачи воды представляет собой смеситель с поворотным изливом и выдвижной лейкой для удобной местной обработки наружной поверхности эндоскопов и медицинских изделий. Система подачи воды подключается к водопроводной сети с горячей и холодной водой.

Система слива

Система слива подключается к общей канализационной сети. Ее конструкция обеспечивает полный слив воды или моющего средства из ванны. Входящая в комплект пробка для сифона позволяет заполнять ванну водой или моющим средством и проводить обработку медицинских изделий с их полным погружением.

Код позиции по КТРУ: 32.50.30.110-00000056

Позиция в каталоге продукции ГИСП: МИУ-«КРОНТ» (только для информационных целей)

Техническое задание

Мойка медицинская инструментальная универсальная МИУ-«КРОНТ» по ТУ 9451-001-99213540-2011

Назначение	Мойка медицинская инструментальная универсальная предназначена для предварительной и окончательной очистки (мойки водой и моющим средством, ручная механическая очистка с помощью щеток) наружных поверхностей, внутренних каналов и клапанов гибких эндоскопов и других медицинских изделий, с целью повышения качества дальнейшей обработки. Конструкция мойки позволяет проводить обработку медицинских изделий методом полного погружения (замачивания) в воду или раствор средств и ручную механическую очистку с помощью щеток.
Конструкция	Тележка установки выполнена из стальных трубных элементов круглого сечения $\varnothing 22$ мм, с порошковым покрытием. Ванна, поддон выполнены из полистирола, разрешенного к применению в изделиях медицинского назначения.
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	(895x650x1230) ± 20 мм
Масса установки	не более 20 кг
Номинальная нагрузка на установку	60 кг, на ванну - 45 кг, на поддон - 10 кг, на 2 полки - 5 кг
Система подачи воды - смеситель	Система подачи воды представляет собой смеситель с поворотным изливом и выдвижной лейкой для удобной местной обработки наружной поверхности эндоскопов и медицинских изделий.
Система слива	Система слива подключается к канализационной сети. Ее конструкция обеспечивает полный слив воды или моющего средства из ванны.

Внутренние размеры ванны (ДхШхГ)	(680х430х165)±10 мм
Максимальный объем ванны	45 л
Колесные опоры	Поворотные колесные опоры ø75 мм с резиновым ободом и тормозом.
Поддон	Рабочая поверхность поддона (ДхШ): 770х400 мм Глубина поддона: 10 мм
Обработка	Обработка любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами.
Гарантийный срок эксплуатации	24 месяца со дня изготовления
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Срок службы	5 лет
Документация	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: koa@nt-rt.ru || Сайт: <https://kront.nt-rt.ru>